

Gigaset

WIDEX

W570 A

You can find the most up-to-date
user guide at
www.gigaset.com/manuals



Gigaset W570 (Widex) – førsteklasses trådløs telefon med direkteoverføring til Widex høreapparater

Gigaset W570 er en førsteklasses trådløs telefon med store taster til fasttelefonnettet som overfører telefonsamtaler via radio og i sanntid rett til Widex høreapparater. Det trengs ingen andre tilleggsapparater. Du hører samtalepartneren din direkte via begge høreapparater og har den beste taleforståelsen også ved telefonsamtaler. Gigaset W570 utmerker seg ved svært enkel håndtering og moderne design. Den betjenes som en helt vanlig telefon og fungerer også uten høreapparater uten noen slags omstilling.

Egenskaper

- Føre en avslappet telefonsamtale ved den beste taleforståelse med direkte overføring av telefonsamtaler (uten tilleggsapparater) til begge høreapparatene samtidig.
- Automatisk kobling via en AutoConnect-funksjon. Telefonen oppretter automatisk trådløs forbindelse til høreapparatene så snart den befinner seg i nærheten av høreapparatene. Da brukes den strømbesparende WidexLink-radioteknologien. Høreapparatbatteriene belastes ikke ekstra.
- Overføring i sanntid. Når du svarer på et anrop, kan du straks begynne å snakke.
- Kompatibel med alle Widex høreapparater som bygger på e-chip-plattformen EVOKE (eller nyere) og er utstyrt med WidexLink-teknologien.
- Førsteklasses trådløs telefon med store taster som også kan brukes av normalthørende familiemedlemmer eller gjester. På den måten trengs det ikke en ekstra telefon i familien.
- Omfattende funksjoner i basestasjonen, f.eks.:
 - Lagringsplass til opptil 150 telefonnumre
 - Høytalersystem med lydstyrkeregulering
 - SOS-funksjon.
- Rekkevidde opptil 300 meter fra basestasjonen, avhengig av omgivelsene.

Betjening

Koble telefon og Widex høreapparater

- ▶ Hold håndsettet til telefonen i nærheten av ett av høreapparatene dine. Telefonen kobles automatisk med høreapparatene.

Oppheve kobling

- ▶ Bring telefonen utenfor rekkevidden til høreapparatene.

Endre lydstyrke

Hvis lydoverføringen eller WidexLink-overføringen er for lav eller for høy, kan du justere lydstyrken.

- ▶ Trykk på lydstyrke-tastene til høyre på håndsettet: oppe : høyere/nede : lavere.

Ellers fungerer telefonen som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Oversikt

Håndsett



1 **Direktevalgtast A** (→ s. 12)
("SOS-tast", → s. 25)

Lyser: SOS-funksjon aktivert

Blinker: SOS-anrop startet

2 **Direktevalgtaster B til D** (→ s. 12)

3 **Meldingstast** (→ s. 21)

Tilgang til anrops- og meldingslistene;

blinker: ny talemelding eller nytt taapt anrop

4 **Skjermtester** (→ s. 13)

Ulike funksjoner, avhengig av betjeningssituasjonen

5 **Ringetast**

Ta imot et anrop; ringe nummeret som vises; åpne repetisjonslisten

Blinker: Motta en samtale

6 **Navigeringstast** (→ s. 11)

Åpne meny; navigere i menyer og dialogbokser; hente inn funksjoner (situasjonsavhengig)

7 **Tast 1**

ringe opp nettelefonvarer (→ s. 28)

8 **Stjernetast**

Ringetone på/av (trykk **lengge**) (→ s. 38)

9 **Lommelykt og signallys (LED)** (→ s. 32)

10 **Volumtaster**

til ringetone, telefonrør/hodetelefon, høyttaler
Øvre tast: stille inn på "ekstra høyt" under en samtale (→ s. 18)

11 **Håndfritast** (→ s. 17)

Koble om mellom telefonrør- og håndfri-modus; ta imot anrop; ringe nummeret som vises

Lyser: Håndfri innkoblet

12 **Avslutt-, av/på-tast**

Avslutte en samtale
avbryte en funksjon
tilbake ett menynivå (trykk **kort**); tilbake til stand by (trykk **lengge**)

Slå av/på håndsett (i stand by trykk **lengge**)

13 **Firkanttast**

Tastelås av/på (trykk **lengge**, → s. 11);

Skrive store, små bokstaver og tall (→ s. 15)

14 **R-tast**

Spørreanrop (Flash): trykk **lengge**

15 **Mikrofon**



Endre skjerspråk: → s. 36

Base Gigaset W570



Registrerings-/søketast

- **Kort trykk:** Søking etter håndsett ("søke")
→ s. 35.
- **Langt trykk:** Registrering av håndsett og DECT-enheter → s. 34.





Innhold

Oversikt	2
Håndsett	2
Base Gigaset W570	3
Slik vises det i brukerveiledningen	5
Sikkerhetsanvisninger	6
Ta i bruk	7
Tilkobling av basen	7
Bruke telefonen	11
Bli kjent med telefonen	11
Telefonere	16
Lister	19
Telefonbok	22
SOS-funksjon	25
Bruke nettelefon svarer	28
Flere funksjoner	29
ECO DECT	29
Bruke håndsett som vekkerklokke	30
Babyalarm	31
Direkteanrop	32
Lommelykt	32
Beskyttelse mot uønskede anrop	33
Bruke flere håndsett	34
Stille inn telefonen	36
Stille inn håndsett	36
Stille inn basen	40
Bruke basen med hussentral	41
Vedlegg	42
Kundeservice og assistanse	42
Merknader fra produsenten	45
Tekniske data	48
Innholdsfortegnelse	51




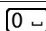
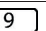



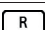
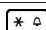
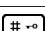


Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.

Slik vises det i brukerveiledningen

	Advarsler som kan føre til personskader eller skader på apparatet, hvis de ikke følges.
	Viktig informasjon om funksjonen og om korrekt håndtering eller om funksjoner som kan medføre kostnader.
	Forutsetning for å kunne utføre den følgende handlingen.
	Nyttig tilleggsinformasjon.







Taster

	Ringetast		Håndfritast
	Avslutt-tast	 til 	Tall-/bokstavnaster
 / 	Navigeringstast kant/ midten		Meldingstast
	R-tast		Stjernetast
	Firkanttast		
OK, Tilbak. ...		Skjermtaster	













Prosedyrer

Eksempel: Slå av/på automatisk anropssvar

► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Telefoni ► OK ► Auto. svar ► OK ( = på)

Trinn	Dette må du gjøre
► Meny	Når håndsettet er i stand by, skal du trykke på skjermtasten Meny . Hovedmenyen åpnes.
►  ► OK	Naviger med navigeringstasten  til oppføringen Innstillinger . Bekreft med OK . Undermenyen Innstillinger åpnes.
►  Telefoni ► OK	Med navigeringstasten velges  oppføringen Telefoni . Bekreft med OK . Undermenyen Telefoni åpnes.
► Auto. svar-	Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar vises som første meny punkt.
► OK	Aktiver eller deaktiver med OK . Funksjonen er aktivert  /deaktivert  .

Sikkerhetsanvisninger

	Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
	Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop. Ved bortfall av LAN- eller nettforbindelsen er funksjoner som krever nettforbindelse ikke tilgjengelige, som f.eks. internettelefon (VoIP), elektroniske telefonbøker eller Infosenter. Hvis telefonen er tilkoblet en analog fastnettkontakt, kan du imidlertid ringe. Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.
	Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se liste over tillatte batterier → www.gigaset.com/service), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.
	Håndsettet skal kun brukes med lukket batterideksel.
	Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
	Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.
	Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret. I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig. Bruk bare den medfølgende kabelen for tilkobling av fastnett og LAN. Disse må bare kobles til kontaktene som er beregnet på dette.
	Koble ut defekte apparat og send det til reparasjon, slik at de ikke forstyrrer andre apparater.
	Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.
	Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader. Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
	Små battericeller og batterier som kan svelges, må oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til forbrenninger, gjennomhulling av bløtvev og død. Det kan opptre alvorlige forbrenninger i løpet av 2 timer etter svelging. Søk lege umiddelbart dersom noen svelger en battericelle eller et batteri.
	Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekantor). Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immun mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).

Ta i bruk

Innholdet i pakken

- En base Gigaset W570,
- ett Gigaset-håndsett Gigaset W570H
- to batterier
- ett batterideksel
- en strømadapter til basen
- en telefonledning RJ11-RJ11, (for tilkobling til kontakten i ruteren)
- en brukerveiledning

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, er det for hvert ekstra håndsett inkludert følgende innhold:

- to batterier
- et batterideksel
- en lader
- en strømadapter



Basen og laderen er beregnet til bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur på mellom +5 °C og +45 °C.


Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politurer som brukes på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.

Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.


Tilkobling av basen

- ▶ **Først** kobler du til telefonstøpset for ditt land **1** og legger ledningene i kabelkanalene.
- ▶ **Deretter** kobler du til strømadapteren **2**.

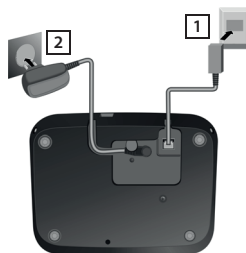


Alternativ: Koble basen til en ruter

- ▶ Koble sammen apparatets telefonkontakt **1** og ruterens telefonkontakt **2** med den medfølgende telefonledningen.

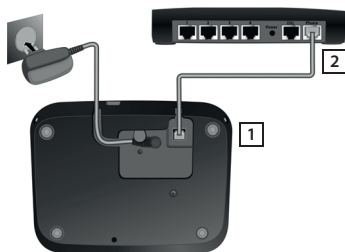


Etter tilkoblingen eller tilbakestillingen av basen er telefonsvarenen først klar til bruk etter ca. 15 sekunder.

Koble til lader (hvis inkludert i leveransen)

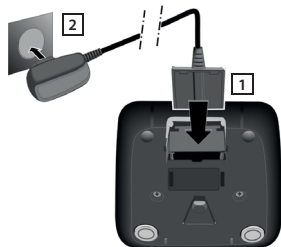

- ▶ Koble til den flate pluggen fra strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkkontakten **2**.

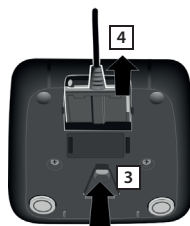

Trekk pluggen ut av laderen igjen:

- ▶ Trekk strømadapteren ut av stikkkontakten.
- ▶ Trykk ned låseknappen **3**.
- ▶ Trekk ut pluggen **4**.

Ta i bruk håndsettet

Skjermen er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Sett inn batteriet og lukk batteridekselet



Bruk bare ladbare batterier, ellers kan det oppstå omfattende skade på personer og materiell. Det kan f.eks. føre til at batterienes hylster ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.



- ▶ Sett inn batteriene (se bilde for retning +/-).



- ▶ Sett inn dekselet ovenfra **1**.
- ▶ Deretter skyver du på dekselet til det klikker på plass **2**.




For å åpne batteridekselet:

- ▶ Skyv dekselet nedover **3**.

Lade batterier

- ▶ Før første gangs bruk skal batteriene lades opp fullstendig i laderen/basen.

Batteriener fulladet når lysesymbolet  slukker på skjermen.



Under lading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.

Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Håndsett som finnes i pakningen, er allerede registrert på basen. Dersom et håndsett likevel ikke er registrert (visning „Vennligst registrer“), må håndsettet registreres manuelt (→ s. 34).

Stille inn språk

Skjermespråk

Første gang du tar apparatet i bruk, blir du spurt på engelsk om hvilket språk du ønsker å bruke til skjermvisningen.

- ▶ ... med  velger du ønsket språk ▶ OK


Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.

► Trykk på skjermtasten under visningen **Tid**. Dialogboksen åpnes.

► Angi dag, måned og år med 8 sifre ved hjelp av tastaturet, f.eks.

for 1. april 2019. ► **OK**

For å endre: Trykk på venstre eller høyre kant av navigeringstasten  for å veksle mellom feltene.

► Angi timer og minutter 4-sifret ved hjelp av tastaturet, f.eks. for kl. 7.15.
Veksle ev. mellom feltene med navigeringstasten. ► **OK**

På skjermen vises **Lagret**. Du hører en bekreftelsestone.

Gå tilbake til stand by: ► Trykk **lenge** på avslutt-tasten .

Bruke telefonen

Bli kjent med telefonen

Slå av/på håndsettet




Trykk på avslutt-tasten **lenge** (bekreftelsestone).

Slå av/på tastelås

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

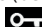

Trykk på firkanttasten **lenge** i stand by-modus (bekreftelsestone). Tastelåsen slås av eller på. Når den er på, vises symbolet  på skjermen.

Når tastelåsen er satt på, ser du en tilsvarende melding når du trykker på en tast.

Tastelåsen slår seg av automatisk når du blir oppringt. Når samtalen er slutt, settes den på igjen.





Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnumre ringes opp. SOS-tasten fungerer også når tastelåsen er på (→ s. 25).

Navigeringstast



Navigeringstasten brukes til å navigere i menyer og tastefelt, og til å åpne bestemte funksjoner avhengig av situasjon.

I det følgende er den siden av navigeringstasten merket med svart (oppe, nede, høyre, venstre), som må trykkes inn i den respektive betjeningssituasjonen, f.eks.  for "å trykke på høyre side av navigeringstasten" eller  for "å trykke midt på navigeringstasten".

I stand by-modus

Åpne telefonboken

Åpne hovedmenyen

Åpne listen over håndsett

I undermenyer, valg- og tastefelt

Bekreft funksjon

Under en samtale

Åpne telefonboken

Slå av mikrofon

Starte intern tilbakeringing




Volumentaster

Stille inn lydstyrken for **telefonrør/hodetelefon** eller **høytaler** i løpet av en samtale eller stille inn lydstyrken på **ringetonen** ved et innkommende anrop (5 trinn).


- ▶ Trykk på volumentastene på høyre side av håndsettet:

 (høyere)/ (lavere)

Den aktuelle innstillingen lagres varig etter ca. to sekunder (→ s. 37).

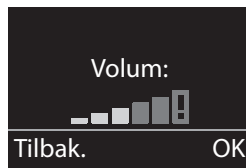

Ekstra høyt-funksjon

- ▶ Trykk så mange ganger på den øvre volumentast  at du når høyeste trinn.



Ekstra høyt-innstillingen gjelder bare så lenge samtalen varer.



- Denne innstillingen kan føre til hørselsskader hos personer med normal hørsel og er kun beregnet brukt av personer med nedsatt hørsel.
- Forstyrrende støy i telefonledningen kan forsterkes.

Direktevalgtaster A til D

På de fire **direktevalgtastene** kan du lagre særlig viktige telefonnumre som du ringer ofte. Hver direktevalgtast kan tilordnes et **eksternt telefonnummer** eller et **internt nummer**.

Du velger dette lagrede nummeret ved å trykke på den tilsvarende direktevalgtasten  til .

Direktevalgtasten  kan også tilordnes SOS-funksjonen (→ s. 25).

Tilordne en funksjon til direktevalgtaster

Forutsetning: Den respektive direktevalgtasten er ennå ikke tilordnet en funksjon.

- ▶ I stand by-modus skal du trykke på direktevalgtasten ( til ) på håndsettet som du vil tilordne en funksjon.

Velg den tilsvarende funksjonen :

- ▶ **Merk med eksternnr.**

Legg inn et ekstern telefonnummer direkte.



Tast inn nummeret og trykk **OK**.



Tast inn navnet og trykk **OK**.

- ▶ **Aktiver internsamt.**

Direktevalg til et håndsett som er registrert på den samme basen.

Dersom flere enn ett ytterligere håndsett er registrert: ▶  Velg håndsett ▶ **OK**

- ▶ **Merk med ring alle int.**

Direktevalg til alle håndsett som er registrert på den samme basen.

- ▶ **Merk med nr. til dir.**

Tilordne tasten med et nummer fra telefonboken.

Telefonboken åpnes. Velg et nummer og trykk **OK**.


Endre funksjonen til direktevalgtastene

- Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Hurtigtaster ► OK ►  Velg direktevalgtast (A til D)

Etter nummeret på tasten vises den aktuelle tilordningen, f.eks.


- **A: <Ingen oppføring>**: tasten  er ennå ikke tilordnet

Nå kan du endre tilordningen.

Velg en ny funksjon med Meny ► . Ikke alle funksjoner er tilgjengelige avhengig av den aktuelle tilordningen. En allerede eksisterende oppføring må slettes først.

- **Slett oppføring**: Slette aktuell tilordning av tasten
- **Endre oppføring**: Endre telefonnummer og/eller navn

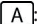


Bare tast : Tilordne tast med SOS-funksjon → s. 26






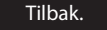

Skjermtaster

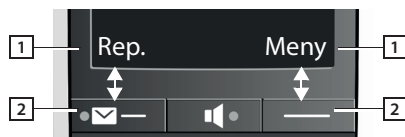Funksjonene til skjermtastene endrer seg etter betjeningssituasjonen. **Eksempel:**

- 1 Aktuell funksjon for skjermtastene
- 2 Skjermtaster



Eksempel:

	Åpne repetisjonslisten.
	Åpne hovedmeny/situasjonsavhengig meny.
	Bekreft valg eller lagre inntasting.
	Tapte anrop eller meldinger på nettelefon svareren (→ s. 21).
	Slettetast: Slette tegn/ord fra høyre mot venstre .
	Gå ett nivå tilbake i menyen eller avbryte en prosess.
	Slå av mikrofonen (→ s. 18).

Skjersymboler



Handling utført



Handling mislyktes



Informasjon



Vekking (→ s. 30)



Vennligst vent ...



Skjerm opp/ned

Menybetjening


Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.


Hovedmeny (første menynivå)


▶ Trykk på skjermtasten **Meny** mens håndsettet er i stand by-modus, for å åpne hovedmenyen.

Funksjonene i hovedmenyen vises med symbol og betegnelse.

Velge en funksjon:

- ▶ Ved å trykke på navigeringstasten  kan du bla fra en funksjon til den neste. Funksjonen som kan velges, vises i displayet.
- ▶ Ved å trykke på skjermtasten **OK** velger du den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.


Hvis du trykker på skjermtasten **Tilbak.** eller **kort** på avslutt-tasten , hopper skjermen tilbake til stand by.

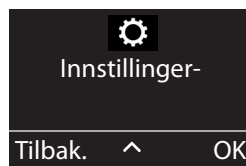


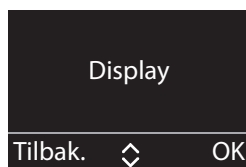
Undermenyer

Funksjonene i undermenyen vises med betegnelse.

Velge en funksjon:


- ▶ Ved å trykke på navigeringstasten  kan du bla fra en funksjon til den neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
- ▶ Ved å trykke på skjermtasten **OK** velger du den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.


Hvis du trykker på skjermtasten **Tilbak.** eller avslutt-tasten  **kort**, kommer du tilbake til det forrige menynivået igjen.



Tilbake til stand by-modus



Fra et vilkårlig sted i menyen:

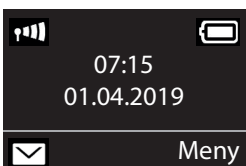- ▶ Trykk på avslutt-tasten  **lenge** eller
- ▶ ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går skjermen **automatisk** over i stand by-modus.



Skrive inn og redigere navn

Ved skriving av navn gjelder følgende regler:

- Hver av tastene mellom **0** og **9** er tilordnet flere bokstaver og tegn.
- Markøren styres med  .
- Tegn settes inn ved markøren.
- Trykk på skjermtasten **Slett** for å slette tegnet til venstre for markøren.
- Den første bokstaven i navnet skrives automatisk stor, de følgende bokstavene er små.



Tegnene som er tilordnet tasten, vises i en valglinje nederst til venstre på skjermen. Det valgte tegnet er fremhevet.

- ▶ Trykk flere ganger **kort** etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.


Stille inn store/små bokstaver eller tall

Modus for innskriving av tekst endrer du ved å trykke gjentatte ganger på firkanttasten .

- 1 Skrive tall
- A Stor bokstav; første bokstav er stor, alle andre små
- a Små bokstaver

Modusveksling vises midt på skjermen.

Korrigerer av feilinntastinger

Feil tegn i dialogbokser retter du ved å navigere med navigeringstasten  til det som er skrevet feil. Da kan du:



- med skjermtasten **Slett** slette tegnet til venstre for markøren,
- legge til tegn ved markøren,
- overskrive det markerte (blinkende) tegnet, f.eks. ved inntasting av klokkeslett og dato.

Telefonere

Hvis du trykker på en tast mens skjermbelysningen er avslått, slås belysningen på.

Ring eksternt

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

▶  Tast inn nummer ▶ trykk på ringetasten  kort

eller

▶ Trykk på ringetasten  lenge ▶ ... tast inn nummer med 




Ring opp et telefonnummer:

- med direktevalgtast → s. 12
- fra telefonboken → s. 22
- fra listen over tapte anrop → s. 20
- fra repetisjonslisten → s. 19



Avslutte en samtale/avbryte oppringing

▶ Trykk på avslutt-tasten  eller sett håndsettet i basen eller laderen.

Besvare anrop

Et innkommende anrop signaliseres på tre måter på håndsettet: med ringelyd, visning på skjermen og blinkende ringetast . Signallyset på baksiden av håndsettet blinker hvis funksjonen **LED-signal anr.** er aktivert (→ s. 38).

Du har følgende muligheter til å svare på anropet:

- ▶ Trykke på ringetasten .
- ▶ Trykke på håndfritasten .
- ▶ Trykke på skjermtasten **Svar**.

Slå av ringelyden:

▶ Trykk på skjermtasten **Ring av**. Du kan ta imot anropet så lenge det vises på skjermen.



Hvis håndsettet står i basen og funksjonen **Auto. svar** er slått på (→ s. 37), tar håndsettet automatisk imot et anrop når du tar det ut av basen.

Nummervisning

Ved et anrop vises nummeret til oppringeren på skjermen hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

- Din nettoperatør støtter CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Nummeret til oppringeren overføres.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til oppringeren vises.
- Du har bedt om CLIP hos din nettoperatør.
- Oppringeren har bedt om CLI hos nettoperatøren.


Nummervisning

Ved et anrop vises telefonnummeret på skjermen.

Hvis nummeret til oppringeren er lagret i telefonboken din, erstattes visningen av den tilhørende telefonbokoppføring.

Istedenfor nummeret vises følgende:

- **Ekst. anrop**, hvis det ikke overføres noe nummer.
- **På vent**, hvis oppringeren skjuler nummervisningen.
- **Utilgjeng.**, hvis oppringeren ikke har bedt om nummervisning.

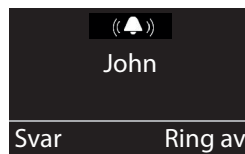

Ringetonen kan slås av for anonyme anrop (anrop med skjult nummer) (→ s. 33).

Håndfri

Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Dermed har du begge hendene fri, og samtidig kan også andre personer høre på.



Hvis du lar noen høre på, bør du informere din samtalepartner om dette.

Slå av/på håndfri

Slå på når du taster et nummer



Tast inn nummeret og trykk på håndfritasten.


Bytte mellom telefonrør- og håndfrimodus



Trykk på håndfritasten.

Under en samtale kobler du håndfri ut eller inn.

Hvis du vil sette håndsettet i laderen under en samtale:


- ▶ Hold håndfritasten  inne mens du setter det inn, og i ytterligere 2 sekunder. Ellers blir samtalen brutt.



Endre samtalevolum, → s. 37.



Slå av mikrofonen

Du kan slå av mikrofonen på håndsettet under en samtale.

- Demp** Trykk på skjermtasten for å slå av mikrofonen på håndsettet.
- På** Trykk på skjermtasten for å slå på mikrofonen igjen.
-  Trykk på navigeringstasten (på høyre side) for å slå av/på mikrofonen.





Endre lydstyrken under en samtale

Lydstyrken endres for den aktuelle modusen (håndfri, telefonrør).

- ▶ Trykk på volumtastene på høyre side av håndsettet: oppe : høyere/nede : lavere.
- Denne innstillingen lagres permanent (→ s. 37).
- Ekstra høyt-funksjon: → s. 12

Ringe internt

Interne anrop er gratissamtaler mellom håndsett som er registrert på samme base.

- ▶  (kort trykk). Til alle vises. ▶  Velg håndsett fra listen (ditt eget håndsett er markert med <) eller Til alle (fellesanrop) ▶ 
- Et langt trykk på  starter straks et anrop til alle registrerte håndsett.

Ta imot internsamtale

Telefonen din ringer, på skjermen vises det interne nummeret til oppringeren (f.eks. INT 2) eller det registrerte navnet.

- ▶ Trykk på svar- eller håndfritasten /  på håndsettet for å svare på anropet.

Avslutte en samtale

- ▶ Trykk på avslutt-tasten  på håndsettet .




Endre navn på håndsettet: → s. 39

Sette over samtale til et annet håndsett/internt spørreanrop


Ekstern samtale, internt spørreanrop:

- ▶  ▶ Listen over håndsett åpnes. ▶ Dersom flere enn to håndsett er registrert på basen, må du velge ett håndsett eller Til alle. ▶  eller OK.

Overføre ekstern samtale: Du har to muligheter for å overføre samtalen:

- ▶ Du venter til den oppringte deltakeren svarer, og så legger du på.
Trykk på avslutt-tasten .

Eller:


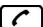
- ▶ Du legger på før deltageren svarer: Trykk på avslutt-tasten .

Hvis den oppringte abonnenten ikke svarer eller overtar anropet, avslutter du spørreanropet med **Tilbak..**

Besvare samtale som venter

Hvis du under en **intern** samtale får et **eksternt** anrop, hører du en varseltone (kort signal).

Hvis du har nummervisning, vises oppringerens nummer på skjermen.

- ▶ Trykk på avslutt-tasten  på håndsettet for å avslutte den interne samtalen.
- ▶ Trykk på svartasten  på håndsettet for å svare på den eksterne samtalen.




Lister

Repetisjonsliste



I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene på håndsettet (maks. 30 sifre).

Hvis ett av numrene står i telefonboken, vises det tilhørende navnet.

Ring fra repetisjonslisten

-  Trykk på ringetasten .
-  Velg oppføring.
-  Trykk på ringetasten. Nummeret ringes opp.

Administrere oppføringer på repetisjonslisten

-  Trykk på ringetasten .
-  Velg oppføring.

Meny Trykk på skjermtasten.

Følgende funksjoner kan velges med  :

- ▶ **Bruk nummer**
- ▶ **Kopier til bok** Overføre nummeret til oppringeren til telefonboken.
- ▶ **Slett oppføring** Slette valgt oppføring.
- ▶ **Slett liste** Slette **alle** telefonbokoppføringer.

Nettelefonsvareliste

Via denne listen kan du lytte til meldingene på nettelefonsvareren (→ s. 28).

Liste over tapte anrop

Forutsetning: CLIP (→ s. 17)

Telefonen lagrer de siste 25 tapte anrop.

Åpne liste over tapte anrop

▶  ▶  Tapte anr.

Listen vises på følgende måte:

Antall nye meldinger + antall gamle, leste meldinger.

OK Trykk på skjermtasten for å åpne listen.

Den første oppføringen som vises, er det siste tapte anropet.

Eksempel på en listeoppføring:

- Status for oppføringen

Nytt anr.: nytt tapt anrop.

Gml. anrop: lest oppføring.

- Oppringers nummer eller navn

Du kan overføre oppringers nummer til telefonboken (→ s. 24).

Tapte anr.:	
	01+02
Tilbak.	OK

Nytt anr.	
	123456
Tilbak.	Meny

Menyfunksjonene

Trykk på skjermtasten **Meny** for å velge følgende funksjoner:

- ▶ **Slett oppføring** Slette valgt oppføring.
- ▶ **Kopier til bok** Overføre oppringers nummer til telefonboken.
- ▶ **Dato og tid** Vise dato og klokkeslett for anrop.
- ▶ **Vis nummer** Vise telefonnummeret til oppringer
- ▶ **Slett liste** Slette alle oppføringer på listen.

Etter at du har gått ut av listen, settes alle oppføringer til status "gammel".

Fra velger du listen over tapte anrop

Åpne listen:  ▶  Tapte anr.

 Velg oppføring.

 Trykk på ringetasten. Nummeret ringes opp.

Vise CNIP-informasjon

Hvis du abonnerer på CNIP, kan nettopperatøren din vise navn og sted som dette telefonnummeret er registrert på.

Du har valgt en oppføring.

► **Meny** ► **Vis navn**

Dersom navn og sted ikke vises, har oppringeren ikke nummervisning eller nummeret er skjult.

OK Trykk på skjermtasten for å vende tilbake til listen.

Slette alle oppføringer

Forsiktig! Alle nye og gamle oppføringer blir slettet

Åpne listen:  ►  Tapte anr.

► **Meny** ►  Slett liste ► OK

Åpne listene med nye meldinger

Meldinger om tapte anrop og meldinger på nettelefonsvaren lagres på meldingslistene.

Hvis det finnes **meldinger**, åpner du med skjermtasten .


- nettelefonsvaren (hvis nettopperatøren din støtter denne funksjonen og nummeret til nettelefonsvaren er oppført, → s. 28),
- listen over tapte anrop.


Så snart det kommer inn en **ny melding på telefonsvaren**, høres en varseltone.


I tillegg blinker meldingstasten .

I stand by-modus vises symboler for meldingstype og antall nye meldinger. Antallet nye oppføringer vises ved siden av det respektive symbolet.

Symbol **Ny melding ...**

 ... på nettelefonsvaren

 ... på listen Tapte anrop

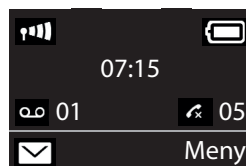

Vise meldinger



Telefonsvarer

► Trykk på meldingstasten  ►  Tlf.svarer ► OK ►  velg telefonsvarer (Nettsvarer) ► OK ...

Nummeret til nettelefonsvaren blir oppringt (mer informasjon → s. 28)

Telefonbok

Tapte anrop

- ▶ Trykk på meldingstasten  ▶  Tapte anr. ... tapte anrop listes opp (mer informasjon → s. 20)




Nye anrop på nettelefonvareren vises bare korrekt hvis nettooperatøren din overfører denne informasjonen (se bruksanvisningen til nettelefonvareren til nettooperatøren din).

Telefonbok

Telefonboken oppretter du individuelt for ditt håndsett. I telefonboken lagrer du numre og tilhørende navn.

Åpne telefonboken

I standby-modus: ▶ Trykk på navigeringstasten 

Lengden på en oppføring

Nummer: maks. 30 sifre

Navn: maks. 16 tegn

Lagre første telefonnummer i telefonboken

- ▶  ▶ Tlf.bok tom Ny oppf.? ▶ OK ▶  (Legg inn nummer) ▶ OK ▶  (Legg inn navn) ▶ OK

Lagre flere numre i telefonboken

- ▶  ▶ Meny ▶  Ny oppføring ▶ OK ▶  (Legg inn nummer) ▶ OK ▶  (Legg inn navn) ▶ OK



Hvordan du legger inn navn, finner du i tegnsettabelen (→ s. 50).


Rekkefølgen på telefonbokoppføringer

Telefonbokoppføringene sorteres alfabetisk. Mellomrom og tall har første prioritet. Sorteringsrekkefølgen er som følger:



- 1 Mellomrom
- 2 Tall (0–9)
- 3 Bokstaver (alfabetisk)
- 4 Andre tegn

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen på oppføringene, føyer du til et mellomrom eller et tall foran navnet. Disse oppføringene rykker da opp til begynnelsen av telefonboken.

Velge telefonbokoppføring

 Åpne telefonboken.

Du har følgende muligheter:

- Bla til oppføringen med  til du kommer til navnet du søker.
- Tast inn det første tegnet i navnet, ev. bla til oppføringen med .

Ring med telefonboken

▶  ▶  (Velg oppføring) ▶ 


Forvalte telefonbokoppføringer

Du har valgt en oppføring.

Endre oppføring

▶ Meny ▶  Endre oppføring ▶ OK ▶  (ev. endre nummer) ▶ OK ▶  (ev. endre navn) ▶ OK

Bruke andre funksjoner

Følgende funksjoner kan du velge med Meny ▶ :

- ▶ **Vis nummer**
Vise nummer.
- ▶ **Slett oppføring**
Slette valgt oppføring.
- ▶ **Send oppføring**
Sende en enkelt oppføring til et annet håndsett (→ s. 24).
- ▶ **Slett liste**
Slette alle telefonbokoppføringer.
- ▶ **Send liste**
Sende en komplett liste til et annet håndsett (→ s. 24).

Overføre telefonboken til et annet håndsett

Du kan overføre alle eller enkelte oppføringer til andre håndsett (→ s. 24). Overføringen er også mulig fra gamle håndsett, så fremt disse er registrert på din (nye) base.

Du kan overføre telefonbokoppføringer fra andre håndsett til ditt nye håndsett – også oppføringer fra gamle håndsett kan overføres.



Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.

Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta kontaktlisteoppføringer.

- ▶  ▶  (Velg oppføring) ▶ Meny ▶  Send oppføring / Send liste ▶ OK ▶  (velg internt nummer til mottakerhåndsettet) ▶ OK

Den vellykkede overføringen bekreftes med en melding og med bekräftelsestonen på mottakerhåndsettet.

Kopiere vist nummer til telefonboken

Du kan overta numre i telefonboken som vises på en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten.

Det vises et nummer.

- ▶ Meny ▶ Kopier til bok ▶ OK
▶ Komplettere oppføringen (→ s. 22).

SOS-funksjon

Håndsettet er utstyrt med fire ekstra taster (direktevalgtaster **A** til **D**).

Direktevalgtasten A kan tilordnes en spesiell SOS-funksjon ("SOS-tast"). Dermed kan du i en nødssituasjon be om hjelp fra venner eller naboer.



SOS-funksjonen må først konfigureres (→ s. 26)



Når SOS-funksjonen er innkoblet, lyser SOS-tasten på håndsettet permanent.

Fremgangsmåte

Utløse nødanrop

► På **håndsettet**: ► Trykk på direktevalgtasten **A**.

Mottakeren av nødanropet hører nødanropsteksten:

- "This is an emergency call." (Dette er et nødanrop.)
- "To accept the call please press key 5." (Trykk på 5-tasten for å besvare nødanropet.)

Når den du ringer til, trykker på 5-tasten, kan dere snakke med hverandre.

Hvis den du ringer til, ikke svarer, **velger SOS-funksjonen etter 60 sekunder automatisk det neste SOS-nummeret** (dersom det er lagret flere numre). SOS-funksjonen går dessuten automatisk videre til neste SOS-nummer etter 60 sekunder i følgende situasjoner:

- Telefonsvareren til det valgte SOS-nummeret er innkoblet,
- SOS-nummeret er opptatt,
- mottakerens telefon er ikke innstilt på "tonesignalering".

Denne fremgangsmåten gjentas maksimalt 5 ganger. Hvis ingen av anropene besvares, avsluttes SOS-funksjonen med en feiltone.



Under hele prosedyren blinker SOS-tasten på håndsettet. Setningen "Sending emergency call" (Nødanrop sendes) vises på skjermen.



Mottakerens telefon må være stilt inn på tonesignalering, ellers vil SOS-anropet ikke kunne bekreftes med 5-tasten.

Konfigurere SOS-funksjon

For å kunne bruke funksjonen må du

- lagre SOS-numre og
- slå på SOS-funksjonen.



Politi, redningstjeneste eller brannvesen kan ikke brukes som nødanrop.

Første konfigurering av SOS-funksjonen



Hvis du allerede har tilordnet tasten **A** for direktevalg, må du først slette dette nummeret (→ s. 12). Deretter kan du lagre SOS-nummeret på direktevalgtasten **A**.

▶ I stand by-modus trykker du på direktevalgtasten **A** på håndsettet.

▶ **Aktiver nødfunksjon** ▶ OK = aktivert

Taste inn målnummer: ▶ Legg inn nummer ▶ OK ▶ Legg inn navn ▶ OK

Du har mulighet til å legge inn ytterligere tre numre:

▶ **Flere nummer?**

Bekreft med **Ja**, hvis du vil legge inn flere SOS-numre, og legg inn numrene. Svar med **Nei**, hvis du ikke vil legge inn flere SOS-numre.

Skjermen viser **Lagret**.

Dermed er SOS-funksjonen konfigurert og slås på automatisk.

Dine SOS-numre:



1	
2	
3	
4	




- Hvis telefonen er koblet til en hussentral, må du ev. legge inn prefikssifferet (for bylinje) som første siffer i oppføringen (→ bruksanvisningen til hussentralen).
- For å sikre at SOS-funksjonen er riktig konfigurert, bør du utføre et testanrop.

Endre SOS-numre

▶ Meny ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Nødanrop ▶ OK ▶ Nødnummer ▶ OK ▶ (Velg oppføring 1 til 4) ▶ Meny ▶ Endre oppføring ▶ OK




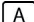
Legg inn nummer og navn som beskrevet over.

Slette SOS-nummer

- Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Nødanrop ► OK ►  Nødnummer ► OK ► 
 (Velg oppføring 1 til 4) ► Meny ►  Slett oppføring ► OK


Oppføringen er slettet.

Slå av/på SOS-funksjonen

- Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Nødanrop ► OK ►  Aktivering ► OK (= på)
 ... tasten  lyser





Vær oppmerksom på at stand by-tiden til håndsettet reduseres ved aktivert SOS-funksjon.

Har du slått på **Sparemodus+** (→ s. 29), så vises den trådløse forbindelsen til basen på håndsettet. SOS-tasten  lyser fortsatt, selv om det ikke lenger er noen trådløse forbindelse.

Du kan kontrollere om basen er tilgjengelig ved å trykke  **lengde** på ringetasten. Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.

Utløse nødanrop




Minst ett SOS-nummer er lagret (→ s. 26) og SOS-funksjonen er innkoblet (tasten  lyser) (→ s. 27).

- Trykk på direktevalgtasten  på håndsettet. Nødanropet starter.



Nødanropet avbryter alle aktive samtaler på basen.

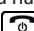Hvis du har **utløst nødanropet utilsiktet**, avbryter du det ved å trykke på avslutt-tasten .

SOS-tasten fungerer også når tastelåsen er på.

Bruke nettelefonvarer

Nettelefonvareren er en telefonsvarer i operatørens nett. Du kan få mer informasjon hos operatøren.



Du kan først bruke telefonsvareren etter at du har **aktivert** den hos operatøren din.

Legge inn nummer til nettelefonvareren

For å kunne bruke nettelefonvareren med enkel tilgang via nettelefonvarerlisten og hurtigoppringing må du legge inn nummeret på telefonen din.

► Meny ► Telefonsvarer ► OK ► Nettpostkasse ► OK



Tast inn nummeret til nettelefonvareren og trykk **OK**.

Ta imot ny melding fra nettelefonvareren

Når det kommer en melding til deg, mottar du et anrop fra nettelefonvareren. På skjermen vises nummeret til nettelefonvareren hvis du har bedt om nummervisning. Hvis du svarer på anropet, blir de nye meldingene gjengitt. Hvis du ikke svarer, lagres nummeret til nettelefonvareren i **listen over tapte anrop** (→ s. 20).



Oppfør telefonnummeret til nettelefonvareren og betegnelsen "Nettsvarer" i telefonboken din, da vises denne betegnelsen straks på skjermen og i anropslisten.

Lytte til meldinger

Du har 3 muligheter for å ringe til nettelefonvareren.

- Ringe til nettelefonvareren via menyen **Telefonsvarer**:
► Meny ► Telefonsvarer ► OK ► Spill av meldinger ► OK ► Nettpostkasse ► OK
- Ringe til nettelefonvareren via nettelefonvarerlisten:
► ► Nettpostkasse (→ s. 21)

Listen vises på følgende måte:

00: Antallet nye meldinger vises bare korrekt hvis nettoperatøren din overfører denne informasjonen.

****:** Antall gamle meldinger er ikke tilgjengelig.

OK Trykk på skjermtasten for å ringe opp nettelefonvareren.

- Hurtigoppringing av nettelefonvareren: ► Trykk på tasten lenge.



Flere funksjoner

ECO DECT

Ved å bruke et Gigaset-apparat gjør du en innsats for miljøet.

Redusert strømforbruk

Ved å bruke en strømbesparende strømadapter er energiforbruket til telefonen < 0,5 W i stand by og når batteriet ikke lades.

Redusert stråling

Strålingen reduseres **automatisk**:

- **Håndsett:** Jo nærmere håndsettet er basen, desto lavere er strålingen.
- **Base:** Når bare ett håndsett er registrert og det står i basen, reduseres strålingen til nesten null.

Du kan redusere strålingen fra håndsett og base ytterligere ved å bruke **Sparemodus** :

- **Sparemodus**
Reduserer alltid strålingen ved håndsett og base med 80 % – uavhengig av om du ringer eller ikke. Med **Sparemodus** reduseres rekkevidden med ca. 50 %. Derfor er **Sparemodus** alltid fornuftig når du ikke trenger stor rekkevidde.

Utkobling av strålingen




- **Sparemodus+**
Når du aktiverer **Sparemodus+**, er strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basen og håndsettet satt i stand by.
Det er også tilfelle ved flere håndsett, så fremt alle støtter **Sparemodus+**.

Sparemodus / Sparemodus+ kan kobles inn eller ut uavhengig av hverandre og fungerer også ved flere håndsett. Håndsettet må ikke stå i basen.

Sparemodus / Sparemodus+ inn-/utkobling:

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Sparemodus / Sparemodus+ ▶ OK (☑ = på).

Visning av tilstand

Skjersymbol	Mottaksstyrke
	– god til dårlig
 (rød)	– intet signal
	Sparemodus+ aktivert (vises i stand by istedenfor symbolet for mottaksstyrke)



- Ved innkoblet **Sparemodus+** kan du kontrollere om basen er tilgjengelig ved å trykke inn ringetasten **lenge**. Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.
- Ved innkoblet **Sparemodus+**:
 - forsinkes samtaleoppkoblingen med ca. 2 sekunder.
 - reduseres stand by-tiden med ca. 50%.
- Hvis du registrerer håndsett som ikke støtter **Sparemodus+**, deaktiveres denne modusen i basen og alle håndsettene.
- Ved innkoblet **Sparemodus** reduseres rekkevidden til basen.
- **Sparemodus / Sparemodus+** og repeater-støtte (→ s. 40) utelukker hverandre gjensidig, dvs. at hvis du bruker en repeater, kan du ikke bruke **Sparemodus** og **Sparemodus+**.

Bruke håndsettet som vekkerklokke

Slå på/av vekkerklokken



► Meny ► Alarm ► OK ► Aktivering ► OK (☑= på)

Når du aktiverer vekkerklokken, åpnes automatisk menyen for å stille inn vekketidspunktet.


Stille inn vekketidspunkt

► Meny ► Alarm ► OK ► Vekketid ► OK ► Legge inn vekketidspunkt ► OK

Når vekkerklokken er slått på, ser du symbolet på skjermen med vekketidspunktet ved siden av.



Vekketidspunktet vises bare på skjermen når du har sett på alle anrop på anropslistene.

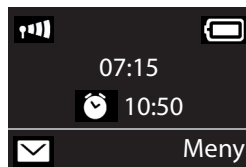

Stille inn vekkesignal

► Meny ► Alarm ► OK ► Signal ► OK ► (☑= på)

Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.

- ▶ **Slå av frem til neste vekking:** Trykk på **Off**

Eller:

- ▶ **Slumring:**
Trykk på **Slumre** eller en hvilken som helst tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter.
Eller:
Ikke trykk på noe. Vekkingen blir avbrutt etter 60 sekunder, og gjentas etter 5 minutter. Etter fjerde gangs gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.

Babyalarm

Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides.

Hvis babyalarm er slått på, blir innkommende anrop bare varslet på skjermen (**uten ringetone**). Displaybelysningen reduseres til 50 %, og varseltonene kobles ut.

Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert. Babyalarmen kan ikke deaktiveres ved å slå håndsettet av og på igjen.



Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.

Når funksjonen er slått på, reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.

Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Telefonsvareren må være slått av på telefonnummeret som blir oppringt.

Etter innkobling:

- ▶ Sjekk følsomheten.
- ▶ Test at forbindelsen kobles opp riktig når alarmen sendes videre til et eksternt nummer.

Aktivere og stille inn babyalarm


- ▶ **Meny ▶ Babymonitor ▶ OK ▶ = Babyalarm på**


Hvis det allerede er registrert et målnummer, er babyalarmen aktivert med det. Skjermen viser **Babyalarm** : og det angitte målnummeret.

Hvis det ikke er registrert et målnummer ennå:




- ▶ Aktiver **Eksternt anrop** : ▶ **OK ▶  Tast inn nummer ▶ OK**

eller aktiver internsamtale:

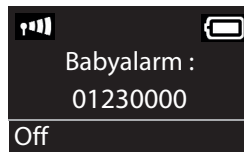
- ▶  **Internt anrop ▶ OK** ... Babyalarmen utløses på alle registrerte håndsett



Endre målnummer

- ▶ Meny ▶ Babymonitor ▶ OK ▶  Ring mottaker ▶ OK ▶  Velg Eksternt anrop eller Internt anrop ▶ OK
- Ved Eksternt anrop: ▶  Tast inn målnummer monitor ▶ OK

Deaktivere babyalarm/avbryte alarm

- Deaktivere babyalarm: ▶ Trykk på skjermtasten **Off** i stand by
- Avbryte babyalarm: ▶ Trykk på avslutt-tasten  mens alarmeren pågår


Direkteanrop

Du kan stille inn telefonen din slik at et bestemt nummer blir oppringt ved trykk på en **hvilken som helst** tast. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste inn et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.

- ▶ Meny ▶  Ettrykks ▶ OK ▶  Aktivering ▶ OK ( = på)


Når du aktiverer direkteanrop, åpnes automatisk menyen for å legge inn målnummeret.

- ▶ **Ring mottaker:** Taste inn eller endre nummeret som skal ringes ▶ OK

På stand by-skjermen vises det at direkteanrop er aktivert. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på avslutt-tasten  for å avbryte oppringningen.

Avslutte direkteanropsmodus:

- ▶ Trykk på skjermtasten **Off** ▶ Trykk på tasten  lenge.

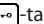eller: ▶ trykk lenge på -tasten




Hvis du allerede har knyttet tasten  til SOS-funksjonen, blir nødnummeret oppringt også ved aktivert direkteanrop.

Lommelykt

Bruk telefonen din som lommelykt.

Slå lommelyktfunksjonen av eller på

- Slå på: ▶ Meny ▶  Lommelykt ▶ OK ... Lommelykten slås på
- Slå av: ▶ **Off** (Etter 2 minutter slås funksjonen av automatisk).



Funksjonen slås av automatisk hvis SOS-funksjon-en betjenes.

Når lykten er på, er alle funksjoner låst, men SOS-funksjonen fungerer.

Lommelykt-LED-en kan også brukes som optisk ringesignal ved innkommende anrop (→ s. 38).

Beskyttelse mot uønskede anrop

Sperreliste

Når sperrelisten er aktivert, blir anrop fra numre som står på sperrelisten, ikke varslet, eller bare varslet på skjermen. Innstillingen gjelder bare for det håndsettet du gjør innstillingen på.

Redigere sperreliste

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringertoner (håndsett) ▶ OK ▶ Avvisningsliste ▶ OK ▶  Blokkerte nummer ▶ OK

- ▶ Ny ▶ Tast inn nummer ▶ OK

Eller:

- ▶ Slett ▶ Slett nummer ▶ OK

Aktivere sperreliste

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringertoner (håndsett) ▶ OK ▶ Avvisningsliste ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK (= Funksjon innkoblet)

Tidsstyring

Du kan angi et tidsrom der telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten.

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringertoner (håndsett) ▶ OK ▶ Tidsstyring ▶ OK

- ▶  Aktivering ▶ OK (= på)

- ▶  Innstillinger ▶ OK ▶ Starttid: /Sluttid: Legg inn klokkeslett med 4 sifre og trykk OK.

Anonyme anrop

Du kan stille inn at håndsettet ikke skal ringe ved anrop fra skjult nummer. Anropet blir bare varslet på displayet.

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringertoner (håndsett) ▶ OK ▶ Demp anonymt anrop ▶ OK (= på)

Bruke flere håndsett

Registrering av håndsett

Du kan registrere opptil fire håndsett på basen.

Manuell registrering av Gigaset-håndsett

Manuell registrering må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter en vellykket registrering skifter håndsettet til stand by.

Registreringsprosessen avbrytes etter 60 sekunder. Dersom registreringen ikke ble gjennomført i løpet av denne tiden, må du gjenta prosessen.

1) På håndsettet

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Registrering ▶ OK ▶  Registrerte håndsett ▶ OK ▶ Tast inn basens system-PIN-kode (fabrikktilstand: 0000) ▶ OK

2) På basen

- ▶ I løpet av 60 sekunder skal du trykke på registrerings-/søketasten på basen **lenge** (ca. 3 sekunder).

Registrere andre håndsett

Håndsett fra andre GAP-kompatible enheter skal du registrere på følgende måte.

1) På håndsettet

- ▶ Start registreringen av håndsettet i samsvar med den respektive bruksanvisningen.

2) På basen

- ▶ Trykk på registrerings-/søketasten på basen **lenge** (ca. 3 sekunder).

Avregistrere håndsett

Fra ethvert registrert håndsett Gigaset W570H kan du avregistrere ethvert annet registrert håndsett.

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Registrering ▶ OK ▶  Avregistr. håndsett ▶ OK



Velg internapparatet som skal avregistreres, og trykk på **OK**.

(Håndsettet som du akkurat betjener, er markert med <.)



Tast inn aktuell system-PIN-kode og trykk på **OK**.

OK


Trykk på skjermtasten.

Søke etter håndsett ("paging")

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

- ▶ Trykk på registrerings-/søketasten på basen **kort**.
- ▶ Alle håndsett ringer samtidig ("paging"), også når ringetonene er slått av.

Avslutte søk

- ▶ Trykk på registrerings-/søke-tasten på basen **kort** eller trykk på ringetasten  eller skjerm-tasten **Off** på håndsettet.

Tilkobling til ekstern samtale


Du ønsker å koble deg til en eksisterende ekstern samtale.

Forutsetning: Funksjonen **Bryt inn** er aktivert.

Aktivere/deaktivere funksjon:


- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Bryt inn ▶ OK ( = på)

Koble til en samtale:

- ▶ Trykk på ringetasten på håndsettet  **lenge**. Alle samtalepartnerne hører en signaltone. På skjermen på håndsettet står **Konferanse**.

Avslutte tilkobling:

- ▶ Trykk på avslutt-tasten  på håndsettet, alle deltakere hører en signaltone.






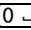
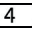



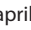





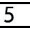
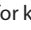
Hvis den **første** interne brukeren trykker på avslutt-tasten , opprettholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne deltakeren.

Stille inn telefonen

Stille inn håndsettet

Du kan endre innstillingene av håndsettet ditt individuelt.


Stille inn dato og klokkeslett

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Dato/ tid ▶ OK
- ▶ bruk  for å legge inn dag, måned og år med 8 sifre, f.eks.           for 1. april 2019. ▶ OK
- ▶ bruk  for å legge inn timer og minutter med 4 sifre, f.eks.      for kl. 7.15
▶ OK

Endre skjermSpråk

Du kan se skjermtekstene på forskjellige språk.

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Språk ▶ OK ▶  (Velg språk) ▶ OK

Det aktuelle språket er merket med .

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

- ▶  ▶   ▶  (Velg språk) ▶ OK

Stille inn store tall

Du kan øke lesbarheten til tallene når du taster et nummer.



- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Store tall ▶ OK (på).







Når funksjonen er slått av, vises både klokkeslett og dato i stand by-modus.

Endre skjermbelysning


Håndsettet i laderen:

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Bakgrunnslys ▶ OK ▶ Koblet til lader ▶ OK (på)

eller utenfor laderen:

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Bakgrunnslys ▶ OK ▶  Ikke koblet til lader ▶ OK ▶ Standby-tid blir redusert ▶ OK (på).

Automatisk anropssvar

Når funksjonen er slått på, tar du ganske enkelt håndsett ut av basen når du får et anrop, uten å måtte trykke på svartasten .

▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Auto. svar ▶ OK (☑= på)


Endre lydstyrke for samtaler

Du kan stille inn lydstyrken for håndfri og telefonrøret i fem trinn (1–5; f.eks. lydstyrke 3 = ).

▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Anropsvolum ▶ OK ▶  Øretlf.- volum / Håndfrivolum ▶ OK ▶  still inn lydstyrke ▶ OK

Justere lydstyrken under en samtale: → s. 18

Endre ringetone

- Lydstyrke: Fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 3 = .
- Melodi: Liste over forhåndsinstallerte ringemelodier.

Ringemelodiene kan stilles inn forskjellig for følgende funksjoner:

- Eksterne anrop
- For interne anrop

Stille inn ringetonevolum

Lydstyrken er lik for alle typer signalisering.

▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringetoner (håndsett) ▶ OK ▶ Volum ▶ OK ▶  ▶ Stille inn lydstyrke ▶ OK

Stille inn ringemelodi

Still inn ulike ringemelodier for eksterne og interne anrop.

For eksterne anrop kan du i tillegg fastsette at telefonen ikke skal ringe til bestemte tider eller ved anonyme anrop.

For interne anrop:

▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringetoner (håndsett) ▶ OK ▶ Melodi ▶ OK ▶  For interne anrop ▶ OK ▶  (Velg melodi) ▶ OK (☑= valgt)

For eksterne anrop:

▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ringetoner (håndsett) ▶ OK ▶ Melodi ▶ OK ▶  Eksterne anrop ▶ OK ▶  (Velg melodi) ▶ OK (☑= valgt)

Slå av/på ringetone

Du kan

- i **stand by-modus** eller **ved et anrop før du svarer** slå av ringelyden permanent
- slå av ringelyden bare for det **aktuelle anropet**.

Det er ikke mulig å slå på igjen under et anrop.

Slå av ringetone permanent:

- ▶ Trykk på stjernetasten  **lenge**. ... På skjermen vises symbolet 

Slå på ringetonen igjen: ▶ Trykk på stjernetasten  **lenge**

Slå av ringelyden for det aktuelle anropet:

- ▶ Trykk på skjermtasten **Ring av**.

Slå av/på optisk ringesignal

Du kan bruke optisk signal til å varsle innkommende anrop (f.eks. ved støy i omgivelsene).

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  LED-signal anr. ▶ OK  = aktivert)

Varseltoner

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Følgende toner kan du slå av eller på uavhengig av hverandre:

- **Servicetoner**
 - **Tasteklikk**: Alle tastetrykk bekreftes.
 - **Bekreftelsestone** (stigende tonerekke): på slutten av en inntasting/innstilling, når håndsettet settes i basen og når det kommer en ny oppføring på anropslisten.
 - **Feiltone** (fallende tonerekke): ved feilinntastinger.
- **Lite batteri**
Batteriet må lades.
- **Ikke dekningsignal**
Håndsettet befinner seg ikke lenger innenfor basens rekkevidde.

Bekreftelsestonen når håndsettet settes i basen, kan du ikke slå av.

Slå av/på varseltoner

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK  = på)

Slå av/på batterivarseltone

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Lite batteri ▶ OK  = på)

Slå av/på rekkeviddevarsling

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydsign-/ visuelle sig. ▶ OK ▶  Ikke dekningsignal ▶ OK ( = på)

Endre navn på håndsettet

Ved registrering gir basen automatisk et navn til håndsettet. Dette navnet kan du endre.

- ▶  ... Listen over registrerte håndsett vises ▶  Velg håndsett ▶ Name ▶  Tast inn navn ▶ OK

Tilbakestill håndsett til fabrikkinnstilling

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken og på anropslisten, dato og klokkeslett, nødnumre og registreringen av håndsettet til basen beholdes.

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Tilbakestill håndsett ▶ OK
- Med  avbrytes tilbakestillingen.

Stille inn basen

Basen stiller du inn med et registrert håndsett.

Slå på/av ventemelodi

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Telefoni ► OK ► Ventemusikk ► OK = på

Repeater-støtte

Med en repeater kan du øke rekkevidden og mottaksstyrken til basen. Bruk av repeater må aktiveres. Da blir samtaler som allerede pågår via denne basen, brutt.

Forutsetning: En repeater er registrert.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► Gjentak.-modus ► OK = aktivert

Etter aktivering eller deaktivering av repeateren må du slå av og på håndsettet ditt igjen (→ s. 11).



- **Sparemodus / Sparemodus+** (→ s. 29) og repeater-støtte utelukker hverandre gjensidig, dvs. at hvis du bruker en repeater, kan du ikke bruke **Sparemodus** og **Sparemodus+**.
- Den standardaktiverte krypterte overføringen deaktiveres ved aktivering av repeatermodus.

Beskytte mot uberettiget tilgang

Sikre systeminnstillingene til basen med en system-PIN-kode som bare du kjenner. System-PIN-koden må du bl.a. taste inn ved registrering og avregistrering av et håndsett til/fra basen.

Endre system-PIN-kode

Du kan endre den innstilte, 4-sifrede system-PIN-koden til basen ("0000") til en 4-sifret PIN-kode som bare du kjenner.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► System-PIN ► OK ► System-PIN: (Tast inn den aktuelle system-PIN-koden) ► OK ► Ny PIN-kode: (Tast inn den nye system-PIN-koden) ► OK

Tilbakestille system-PIN-koden

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du tilbakestille basen til den opprinnelige koden **0000**:

Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold registrerings-/paging-tasten på basen nede mens du samtidig kobler strømkabelen til basen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Basen er nå tilbakestilt og system-PIN-koden **0000** er innstilt.



Alle håndsett er avregistrert og må registreres på nytt. Alle innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Tilbakestille basen til fabrikkinnstillinger

Ved tilbakestilling

- blir dato og klokkeslett beholdt,
- forblir håndsett registrert,
- blir **Sparemodus** og **Sparemodus+** koblet ut,
- system-PIN-koden blir ikke tilbakestilt.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► Tilbakestill base ► OK

Bruke basen med hussentral

Følgende innstillinger er kun nødvendige når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen.

Midlertidig endre til tonesignalering (DTMF)

Dersom hussentralen din fortsatt arbeider med puls (DP), mens tonesignaleringsmetoden er nødvendig for en forbindelse (f.eks. for å lytte på nettelefonvareren), må du stille om til tonesignalering for den samtalen.

Forutsetning: Du fører nettopp en samtale eller har allerede tastet et eksternt nummer.

► Trykk på stjernetasten .

Tonesignalering er **bare koblet inn for denne forbindelsen**.

Stille inn flash-tid

► Meny ► # ► 0 5 # ► 1 2 ► Legge inn siffer for flash-tid:
 = 80 ms; = 100 ms; = 120 ms; = 400 ms; = 250 ms; = 300 ms;
 = 600 ms; = 800 ms ► OK

Endre pause etter linjetildeling

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten og sending av nummeret.

► Meny ► # ► 0 5 # ► 1 9 ► Legg inn siffer for den aktuelle pause-lengden: = 1 sekund; = 3 sekunder; = 7 sekunder ► OK

Endre pause etter R-tast

► Meny ► # ► 0 5 # ► 1 4 ► Legg inn siffer for den aktuelle pause-lengden: = 800 ms; = 1600 ms; = 3200 ms ► OK

Vedlegg

Kundeservice og assistanse

Skrutt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service.



Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du bl.a.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finder du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... **online:**

Via vårt kontaktskjema på kundeservicesidene

... **på telefon:**

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Løsningsforslag på Internett under www.gigaset.com/service

I tillegg er feilsøkingshjelpemidler oppført i den følgende oversikten.

Skjermen viser ingenting

- Håndsettet er ikke slått på: ► Trykk på avslutt-tasten  lenge.
- Batteriet er tomt: ► Lad eller bytt batteriet (→ s. 9)

Du hører samtalepartneren bare på det ene øret

- Hold håndsettet nærmere høresystemet

Apparatet lades ikke

- Håndsettet står ikke riktig i ladestasjonen: ► Sett inn håndsettet korrekt

Apparatet slår seg av selv om batteriet ifølge visningen fortsatt er 2/3 fullt

- Kontaktene/batteriene er forurenset eller korrodert ► Rens kontaktene/batteriene eller bytt batteriene (→ s. 9)

Samtalen forstyrres eller avbrytes helt

- Signalene svekkes av vegger, tak, isolasjon osv. ► Ikke sett basen bak/under metallgjenstander. Ikke sett basen i kjelleren hvis mulig (→ s. 7)

Håndfrikvaliteten er ikke god

- Tilskitning av håndsettet (f.eks. sminke, støv, jernspon; ...) ► Rengjør håndsettet (→ s. 46)

Høye kneppelyder, bakgrunnsstøy, forstyrrende ulyder, klørellyder, varierende lydstyrke

- Forstyrrelse fra andre enheter (adaptore til faks, PC, skriver, mobiltelefon) ► Øk avstanden til andre enheter (min. en halv meter) (→ s. 7)

Du kan ikke ringe, og på skjermen blinker "BASE" eller "Ingen base"

- Strømkabelen til basen er ikke tilkoblet: ► Kontroller basens strømadapter (→ s. 7)

På skjermen vises "Ikke mulig!"

- Det er ikke mulig å ringe eksternt mens en annen ekstern samtale pågår. ► Vent til den andre samtalen er ferdig (gjelder ikke hvis funksjonen Intern tilkobling er aktivert).
- Før eksternt samtale mens det snakkes på telefonsvareren. ► Vent til meldingen på telefonsvareren er ferdig

Klokkeslettet tilbakestilles til fabrikkinnstillingen

- Base og håndsett ble slått av samtidig ► Still inn klokkeslettet på nytt (→ s. 10)

I anropslisten er det ikke angitt tid

- Dato/klokkeslett er ikke stilt inn ► Still dato/klokkeslett (→ s. 10)

Tilbakeringing, veksling mellom samtaler og konferanse ikke mulig.

- Disse funksjonene, som kan gjennomføres på enheten, må tilbys og aktiveres av nettoperatoren. Håndteringen kan være forskjellig avhengig av nettoperator. ► Ta kontakt med din nettoperator

Lydstyrken til håndsettet (telefonøret) er for lav

- Lydstyrken står på laveste nivå
 - Endre innstillingen av lydstyrken i telefonrøret (→ s. 37)
 - Endre håndsett-posisjonen ved øret

Håndfrilystyrken er for lav

- Lydstyrken står på laveste nivå ► Endre innstillingen av håndfrilystyrken (→ s. 37)

Du hører en tone under bruk

- Handlingen mislyktes/feil ved inntasting ► Gjenta prosessen. Se på skjermen, og les brukerveiledningen
- Batteriene er tomme ► Lad batteriene (→ s. 9)
- System-PIN-koden du tastet inn, er feil ► Tast inn system-PIN-koden på nytt eller tilbakestill den (→ s. 40)

Du hører en tone under samtalen

- Batteriene er tomme ► Lad batteriene (→ s. 9)

Du har glemt system-PIN-koden

- Tilbakestill system-PIN-koden til 0000 (→ s. 40)

Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode

- System-PIN-koden du tastet inn, er feil ► Tast inn system-PIN-koden på nytt eller tilbakestill den (→ s. 40)

Enheden har vært i kontakt med væske

- La enheten tørke. ► Kontakt med væske (→ s. 47)

Konfigurering av SOS-funksjonen fungerte ikke

- Du har ikke lagret noe SOS-nummer ► Lagre minst ett SOS-nummer (→ s. 26)
- SOS-funksjonen er ikke innkoblet ► Aktiver SOS-funksjonen (→ s. 26)
- SOS-funksjonen fungerer bare når apparatet er koblet til direkte eller til et telefonanlegg der det ikke kreves "R" eller "P" for tilordning av eksternt anrop ► SOS-funksjon direktevalg tast (→ s. 25)

Mottakeren av et SOS-anrop svarer ikke

- På noen telefonanlegg blir bekreftelse av SOS-anropet ved å trykke på 5-tasten ikke videreformidlet til det tilkoblede håndsettet. SOS-funksjonen kan da ikke brukes fordi det ikke er mulig å føre en samtale. ► Etter konfigureringen må SOS-funksjonen testes med alle registrerte mottakere.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrastyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- Som garantibeviss må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekrefte at garantibetingelsene er oppfylt.
- Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Ansvarsfraskrivelse

Displayet på ditt håndsett består av bildepunkter (pikslar). Hver piksel består av tre underpikslar (rød, grønn, blå).

Det kan forekomme at en underpiksel faller bort eller at det forekommer et fargeavvik.

En garantisituasjon foreligger kun hvis maksimalt antall tillatte pikselfeil overskrides.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargelysende underpikslar	1
Mørke underpikslar	1
Totalt antall fargelysende og mørke underpikslar	1



Spor etter bruk på skjermen og huset er utelukket fra garantien.



Gigaset W570 er en førsteklasses trådløs telefon med store taster som overfører anrop rett til høresystemene fra Widex (Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lyngby, Danmark).

Vi påtar oss intet ansvar for høresystemene eller for skader som opptrer grunnet bruken av høresystemene. Ved spørsmål må du vennligst henvende deg til din faghandler for høresystemene.

Merknader fra produsenten

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset W570 - Gigaset W570H oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.gigaset.com/docs.

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europaiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

Personvern

Vi i Gigaset tar vernet av kundenes personopplysninger svært alvorlig. Nettopp av den grunn sikrer vi at alle våre produkter utvikles etter prinsippet om innebygd personvern ("Privacy by Design"). Alle opplysninger som vi samler inn, brukes til å gjøre produktene våre så gode som mulig. Samtidig sikrer vi at personopplysningene dine beskyttes og bare brukes til det formål å gjøre en tjeneste eller et produkt tilgjengelig for deg. Vi vet hvilken vei dine opplysninger tar i selskapet og forsikrer at dette skjer trygt, beskyttet og i overensstemmelse med personvernloven.

Den fullstendige teksten for personvernbestemmelsene er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.gigaset.com/privacy-policy

Miljø

Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

Miljøstyrinssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes. Bruk **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 **Trekk samtlie ledninger ut av enheten.**
- 2 **Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.**
- 3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
- 4 Tørk forsiktig av alle deler.
- 5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.)**.
- 6 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

Tekniske data

Batterier

Håndsett

Teknologi:	Nikkel-metallhydrid (NiMH)
Størrelse:	AAA (HR03)
Spenning:	1,2V
Kapasitet:	750 mAh

Apparatet leveres med to godkjente batterier.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til telefonen avhenger av batterikapasiteten, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser.)

Stand by-tid (timer) *	320*/200**
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) *	130*/100**
Ladetid i base (timer)	9
Ladetid i lader (timer)	7,5

*Sparemodus slått av, uten skjermbelysning i stand by

**Sparemodus slått på, uten skjermbelysning i stand by

Basens effektbehov

I stand by

- Håndsett i lader ca. 0,70 W
- Håndsett utenfor lader ca. 0,50 W

Under en samtale ca. 0,70 W

Generelle tekniske data for DECT


DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK

Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW middels effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 300 m utendørs, inntil 50 m i bygninger
Basens strømforsyning	230 V~ / 50 Hz
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode	DTMF (tonevalg)

Generelle tekniske data for WIDEX

	WidexLink™
Frekvens	10,6 MHz
Frekvensdeviasjon	± 200 kHz
Båndbredde	660 kHz (-15 dB)
Kanaler	Enkeltkanal
Modulasjon	FSK
Midlere utgangseffekt	13 nW (~ -48.8 dBm)
Magnetisk feltstyrke	-15 dBμA/m @ 10 m
Innkoblingsvarighet	100% simplex
Lydforsinkelse	< 10ms

Kontakttilordning i telefonpluggen

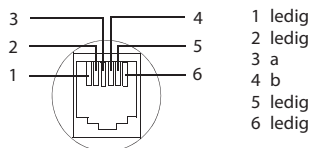

Skrifttabell

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ∞	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ä					
0	←	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ↻	*	/	()	<	=	>	%							
# →		#	@	\	&	§									

1) Mellomrom

Innholdsfortegnelse

A	
Alarm	
babyalarm	32
Anonyme anrop	33
Anonyme anrop av	33
Anrop	
besvare	16
Anrop fra ukjent	17
Anropsbeskyttelse	33
Anropsliste	19, 20
Anropssvar	37
Ansvarsfraskrivelse	45
Automatisk anropssvar	16, 37
Av/på-tast	2
Avregistrere (håndsett)	34
Avslutt-tast	2, 16
B	
Babyalarm	31
Base	
bruke med hussentral	41
endre system-PIN-kode	40
stille inn	40
system-PIN-kode	40
tilbakestille til fabrikkinnstillinger	41
tilkobling	7
Batteri	
lade	9
sette inn	9
varseltone	38
Bekreftelsestone	38
Beskytte telefonen mot tilgang	40
Beskyttelse mot anrop	33
Boost-tast	2
Bortfall	
internettforbindelse	6
LAN-forbindelse	6
Bruksområde	45
C	
CLI, CLIP	17
CNIP	21
D	
Deponering	46
Direkteanrop	32
Direktevalg	
lagre nummer	12
Lagre/endre tastelordning	12
på hussentraler	26
Direktevalgtast A	2
Direktevalgtaster B til D	2
E	
ECO DECT	29
Eco-modus	29
Eco-modus+	29
Ekstra høyt-funksjon	12
Endre	
skjermsspråk	9
system-PIN-kode	40
Endre navn på håndsettet	39
Endre PIN	
system-PIN-kode	40
Endre PIN-kode	40
Endre system-PIN-kode	40
F	
Feilinntastinger (korrektur)	15
Feiltone	38
Firkantast	2, 11
G	
Garanti	44
Gjenta oppringing	19
H	
Hurtigoppringing	
telefonsvarer	28
Hussentral	
bruke basen med hussentral	41
endre til tonesignalering	41
stille inn flash-tid	41
stille inn signaleringsmetode	41
Høreapparater	6
Håndfri	17
tast	2
Håndsett	
avregistrere	34
bruke flere	34
endre navn	39
registrere	34
sette over samtale	18
skjermsspråk	9, 36
slå av	18
slå av/på	11
stand by-modus	14
stille inn (individuell)	36
stor skrift	36
søke etter	35
ta i bruk	9
talelydstyrke	37
tilbakestille til fabrikkinnstilling	39
varseltoner	38

Innholdsfortegnelse

I	
Innholdet i pakken	7
Intern samtale	18
samtale venter	19
Internettforbindelse	
bortfall	6
Internsamtale	18
Internt spørreanrop	18
K	
Knust skjerm	6
Koble til en samtale	35
Koble til internt	35
Konfigurere nødanrop	26
Kontakt med væske	47
Kontakttilordning	49
Korrigerings av feilinntastinger	15
Kortnummer se direktevalg	
Kundeservice og Assistanse	42
L	
LAN-forbindelse	
bortfall	6
Legg inn Flash	2
Liste	
anropsliste	19, 20
repetisjonsliste	19
tapte anrop	20
Lommelykt (spot-LED)	32
Lydstyrke	
ringetone	37
Lytte	
melding (telefonsvarer)	28
Lås	
slå av/på tastelås	11
M	
Medisinsk utstyr	6
Melding	
lytte til	28
Melding fra	
nettelefonvarer, se på	28
Meldingstast	2
åpne lister	21
Menybetjening	14
Merknader fra produsenten	45
Miljø	46
Mottaksforsterker se Repeater	
N	
Navigeringstast	2
Nettelefonvarer	28
Nummer	
lagre i telefonboken	22, 24
vise innringerens nummer (CLIP)	17
Nummervisning	17
Nummervisning, merknader	17
Nødsamtale	
ikke mulig	6
O	
Oversikt	
håndsett	2
P	
Personvern	46
R	
Redusere stråling	29
Redusert strømforbruk	29
Redusert stråling	29
Registrering (håndsett)	34
Rekkefølge i telefonboken	22
Rekkevidvarsling	39
Rengjøring av apparatet	46
Repeater	40
Ring	
eksternt	16
internt	18
Ring fra telefonboken	23
Ring tilbake fra anropslisten	20
Ring tilbake til oppringeren	20
Ringetast	2
Ringetone	
endre	37
slå av for anonyme anrop	33
stille inn lydstyrke	37
stille inn melodi	37
R-tast	2
S	
Samtale	
intern	18
koble til deltaker	35
sette over (forbinde)	18
Send	
telefonbokoppføring til et håndsett	24
Signaleringsmetode	41

Sikkerhetsanvisninger	6	Systeminnstillinger	40
Skjerm		Søke	35
endre skjermSpråk	9, 36	i telefonboken	23
i stand by-modus	14	Søke etter	
knust	6	håndsett	35
stille inn	36		
Skjermtaster	2, 13	T	
Skrive inn og redigere tekst	15	Ta i bruk (håndsett)	9
Slette tegn	15	Talelydstyrke	37
Slettetast	13	Tapt anrop	20
Slumring (vekkerklokke)	31	Tast 1 (hurtigoppringing nettelefonvarer)	2
Slå av		Tasteklikk	38
anropssvar	37	Tastelås	11
håndsett	11	Taster	
tastelås	11	av/på-tast	2
varseltoner	38	avslutt-tast	2
Slå av mikrofonen på håndsett	18	boost-tast	2
Slå på		firkantast	2, 11
anropssvar	37	hurtigoppringing nettelefonvarer	2
håndsett	11	hurtigoppringing telefonvarer	28
tastelås	11	håndfritast	2
varseltoner	38	meldingstast	21
SOS-funksjon		navigeringstast	2
konfigurere	26	ringetast	2
slå av/på	27	R-tast	2
Sperreliste	33	skjermtaster	2, 13
Spørreanrop internt	18	slettetast	13
Stand by-modus (skjerm)	14	stjernetast	2
Stand by-modus, gå tilbake til	14	tast 1	2
Stille	30	tast 1 (hurtigoppringing telefonvarer)	28
Stille inn dato	10	volumtast	2
Stille inn fabrikkinnstilling		Tegnsett	50
base	41	Tekniske data	48
håndsett	39	Telefonbok	22
Stille inn flash-tid	41	lagre første nummer	22
Stille inn klokkeslett	10	lagre oppføring	22
Stille inn lydstyrke		rekkefølge på oppføringer	22
høytaler	37	sende oppføring/liste til håndsett	24
ringetone	37	velge oppføring	23
telefonrør	37	Telefonere	
Stille inn lydstyrken	12	besvare anrop	16
Stille inn melodi (ringetone)	37	ekstern	16
Stille inn volum		Telefonering	
språk håndsett	37	intern	18
Stjernetast	2	Telefonrørmodus	17
Stor skrift	36	Telefonrørvolum	37
Strømadapter	6	Telefonstøpsel, kontakttilordning	49
Strømadapter, strømbesparende	29	Tidsstyring	38
Strømbesparende strømadapter	29	Tilgangsbeskyttelse	40
Strømforbruk	48	Tonesignalering	41
Swarteliste se sperreliste			
Symbol		U	
ringetone	38	Ukjent	17
tastelås	11		
Symboler			
vise nye meldinger	21		

Innholdsfortegnelse

V	
Varseltoner (batteri)	38
Varseltoner	38
Vekkerklokke	30
Ventemelodi	40
Ventende samtale, intern samtale	19
Vise	
nummer (CLI/CLIP)	17
Vise nye meldinger	21
Visning	
nettelefonvarer-melding	28
Volumtast	2
Volumtaster	12
Væske	47

W	
Widex	
Endre lydstyrke	1
Koble telefon og høresystem	1
Oppheve kobling med telefon	1
Widex høresystemer	1

Med enerett. Med rett til endring

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com